

# GS1 GLUCOZĂ CONTINUĂ SISTEM DE MONITORIZARE

Inserție produs  
GHID DE UTILIZARE



H A0 06/ 2024

Scanați codul pentru videoclipul cu instrucțiuni înainte de utilizare



Ghid rapid






Scanați codul QR pentru a descărca APLICAȚIA SIBIONICS sau descărcați APLICAȚIA din Apple APP Store sau Google Play.




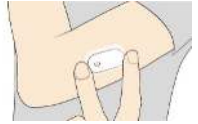


Prin prezenta, Shenzhen SiSensing Co, Ltd. declară că sistemul de monitorizare continuă a glucozei de tip echipament radio este în conformitate cu Directiva 2014/ 53/ UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<https://www.sibionicsserver.com/#/doc>

Pas	Acțiune	
1		Aplicați senzorii doar pe partea din spate a brațului superior. Evitați zonele cu cicatrici, alunițe, vergeturi sau umflături.
2		Spălați zona de aplicare folosind un săpun simplu, uscați și apoi curățați cu un șervețel cu alcool. <b>Notă:</b> Zona <b>TREBUIE</b> să fie curată și uscată urmând aceste instrucțiuni, altfel senzorul s-ar putea să nu rămână pe toată perioada de purtare de 14 zile.
3		Deschideți pachetul cu senzor desprinzând complet capacul. Scoateți capacul de pe aplicatorul de senzor și puneți capacul deoparte. <b>ATENȚIE:</b> NU folosiți dacă pachetul senzorului sau aplicatorul senzorului par a fi deteriorate sau deja deschise. NU folosiți dacă a expirat.
4		Aliniați umflătura albă mică de pe aplicatorul senzorului cu concavitatea de pe marginea pachetului senzorului. Pe o suprafață dură, apăsați ferm pe aplicatorul senzorului până când se oprește. <b>ATENȚIE:</b> NU îndepărtați clipsul de siguranță (vezi pasul 6) de pe aplicatorul senzorului.
5		Ridicați aplicatorul senzorului din pachetul cu senzor. <b>ATENȚIE:</b> Aplicatorul senzorului conține acum un vârf. NU atingeți interiorul aplicatorului senzorului sau nu-l puneți înapoi în pachetul cu

Pas	Acțiune	
		senzor.
6		Apăsați clipul de siguranță și trageți-l afară din aplicatorul senzorului.
7		Plasați aplicatorul senzorului peste locul pregătit și apăsați ferm pentru a aplica senzorul pe corpul dumneavoastră. <b>ATENȚIE:</b> NU apăsați pe aplicatorul senzorului înainte de a-l plasa pe locul pregătit pentru a evita rezultatele neintenționate sau rănirea. Asigurați-vă că mica umflătură albă de pe aplicatorul senzorului este în direcția de sus sau de jos.
8		Trageți ușor aplicatorul senzorului departe de corpul dumneavoastră. Senzorul ar trebui acum să fie atașat de pielea dumneavoastră. <b>Notă:</b> Aplicarea senzorului poate provoca vânătăi sau sângerări. În caz de sângerare persistentă, îndepărtați senzorul și contactați profesionistul dumneavoastră în domeniul sănătății.
9		Asigurați-vă că senzorul este fixat corect după aplicare. <b>Notă:</b> Folosiți telefonul pentru a comunica cu senzorul imediat după aplicare.